



DNA TECHNOLOGIES

Vodič za niti BIJOU

- 01 O niti BIJOU Thread
- 02 Vodič za postupak
- 03 Kombinacija niti
- 04 Prije i poslije





- Medicinska spužva proizvedena u Njemačkoj
- Visokokvalitetna igla proizvedena u Japanu
- PDO nit proizvedena u Koreji



DRUGI NAČINI PROIZVODNJE PAKIRANJA

UOBIČAJENI



Zadržavanje vlažnosti 30~40%

N2



Zadržavanje vlažnosti 20~30%

GLOVE BOX (KOMORA S RUKAVICAMA)

Prosječno 400 ppm ispod razine odsutnosti vlage

Ispod 400PPM




Glove Box

- Vlaga je glavni čimbenik niske kvalitete. Prisutnost vlage utjecala je na raspadanje polidioksanona.
- Većina proizvođača pakiranja priprema s pomoću N2 plina ili vakuma bez uklanjanja vlage u PDO niti
- Međutim, BIJOU upotrebljava prednosti komore s rukavicama (Glove Box) kako bi se uklonili učinci vlage.



Rezultat: Nema lomljivosti, duže trajanje

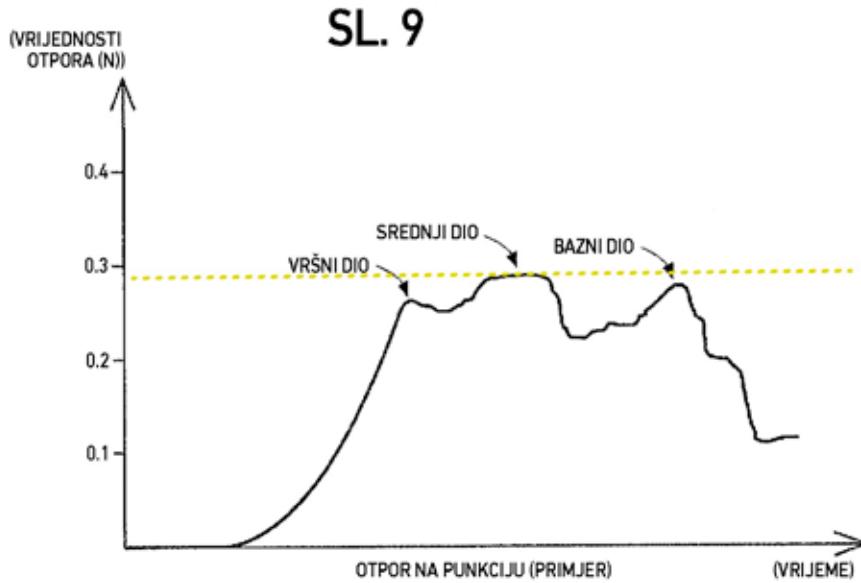


Kao što je vidljivo iz gornjeg dijagrama, vrijednost otpora igle BIJOU niža je nego kod ostalih proizvođača. Osim toga, krivulja dijagrama pokazuje da je otpor na ubrizgavanje iglom stabilan za razliku od ostalih proizvođača.




Rezultat: Ugodno ubrizgavanje,
manje oteklina, modrica, krvarenja

IGLA ZA NIT BIJOU
PROIZVEDENA U JAPANU

NEPOZNAT PROIZVOĐAČ

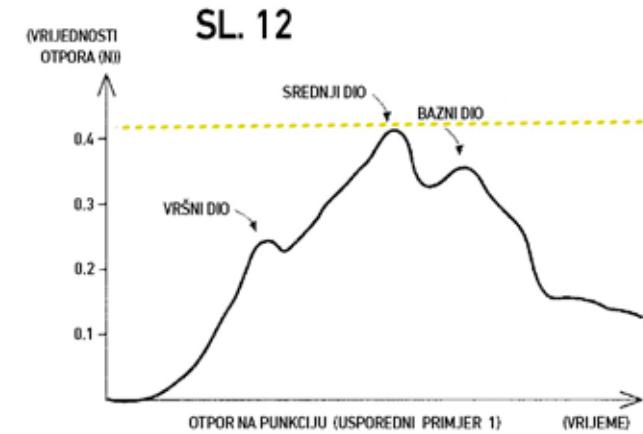


NEPOZNAT PROIZVOĐAČ

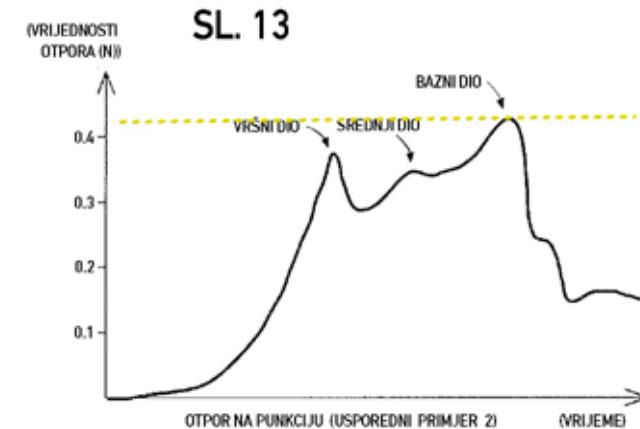

Nazubljena nit BIJOU apsorbirajući je monofilamentni kirurški konac sa zupcima (bodljikava nit) koji je osmišljen i poboljšan kako bi se dulje održao u tkivu.

Zupci postaju potporna struktura za meka tkiva kada se konac umetne ispod kože.

Stoga je takva vrsta nazubljene niti mnogo stabilnija i ima dugotrajan učinak.

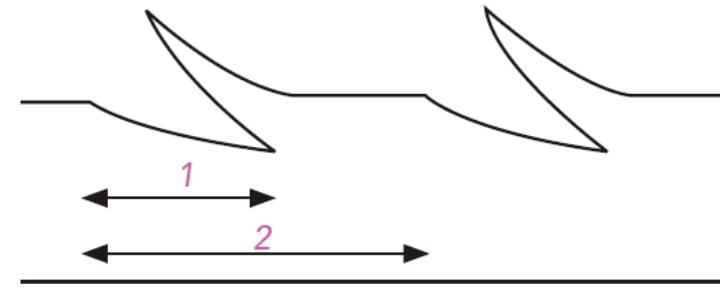


1 je širina zupca, 2 je razmak između zubaca.
Što je 2 manji i što je 1 veći, nit će biti jača, iako proizvodnja zahtijeva više vremena i truda.

Jačina sidrenja / Vlačna čvrstoća

Učinkovito zatezanje i izvrsna klinička primjena rezultat su nazubljene niti BIJOU koja ima veću snagu sidrenja i vlačnu čvrstoću od ostatka ponude uobičajeno rezanih niti, učinkovita je u zatezaju lica i tijela te se ne lomi tijekom postupka umetanja.

Veličina USP 1-0

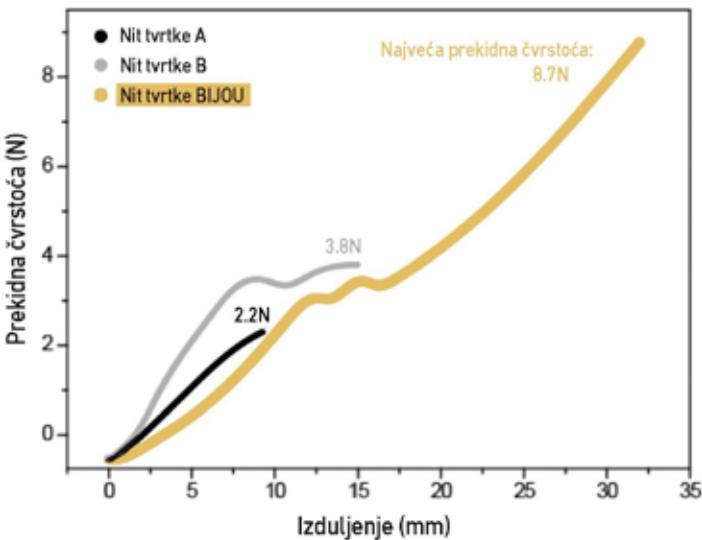

Rezultat vlačne sile

BIJOU




8.7N

PROIZVOĐAČ J

3.8N

PROIZVOĐAČ A

2.2N

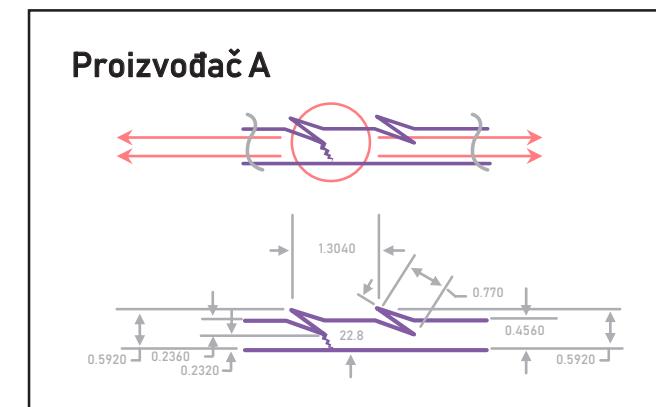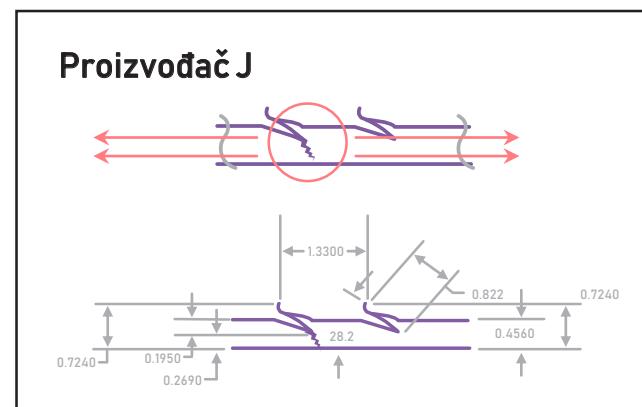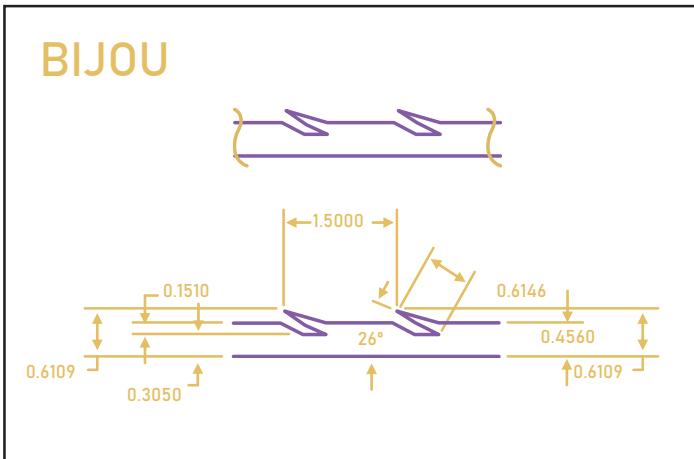

Zahvaljujući visokotehnološkom obliku i uzorku nazubljene niti, nit BIJOU Thread ima veću vlačnu čvrstoću i čvrstoću sidrenja od bilo koje druge niti.

Izbor niti ili kombinacija različitih vrsta niti ovisi o obliku lica, veličini kosti, starosti i tipu kože pacijenta.



Planiranje



Anestezija





Umetanje niti

Okomito zatezanje povećava prianjanje između niti i kože, mišića ili kostura, a rezultira pasivnim efektom podizanja i uzrokuje priljubljivanje opuštene kože.

Kod primjene u blizini krutih tkiva kao što su kosti i ligamenti, pojačava se prianjanje kože i fiksnih tkiva i povećava se učinak učvršćivanja.

1. Dubina zahvata
 - Potkožni sloj masnog tkiva / fascija / panniculus carnosus / ligament
2. Razlozi zbog kojih se ne primjenjuju u dermi
 - Radi sprječavanja moguće upale iritacijom žlijezda lojnica.
 - PDO može biti vidljiv na koži.
 - PDO može izaći uslijed pokreta.

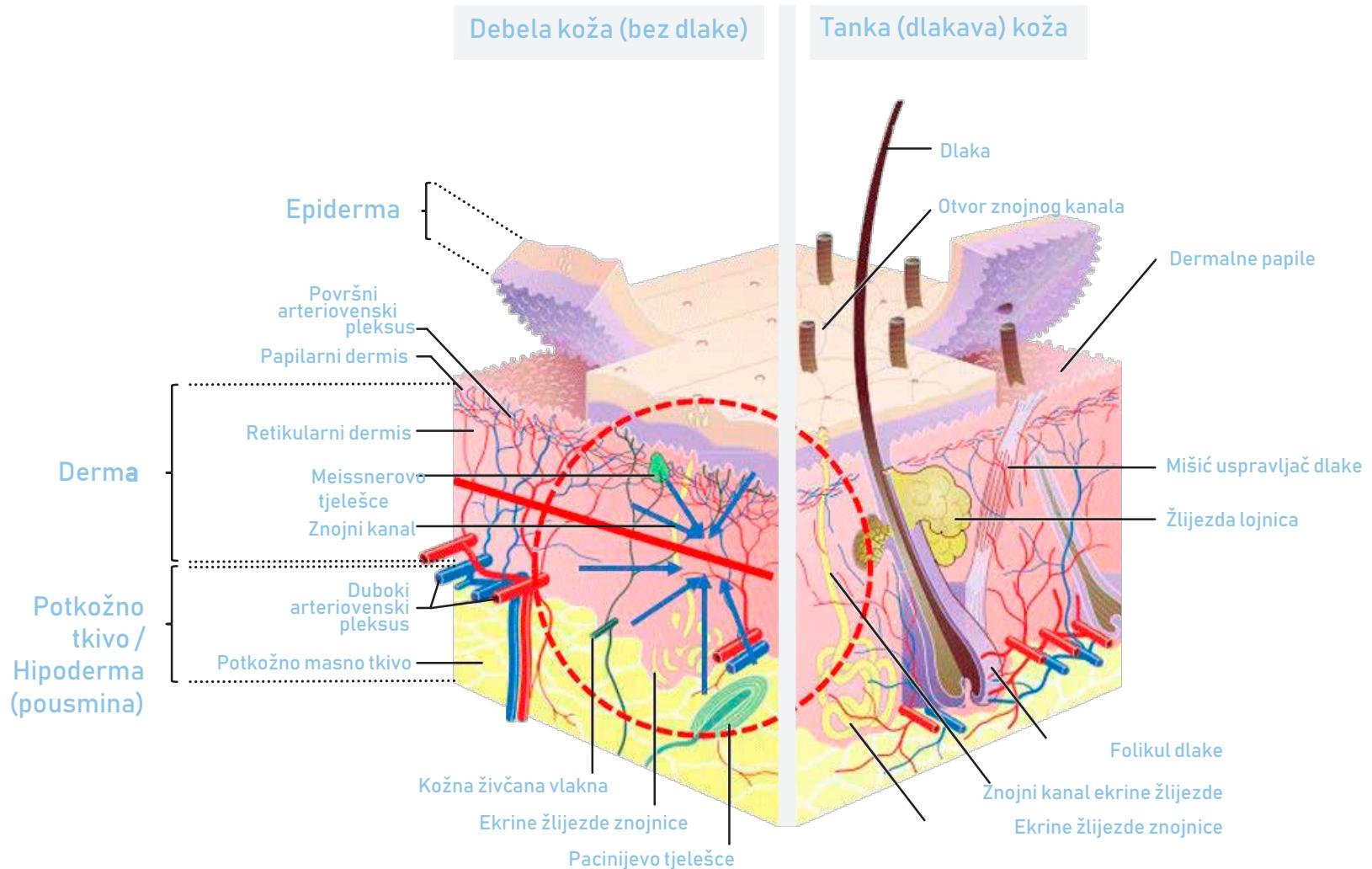

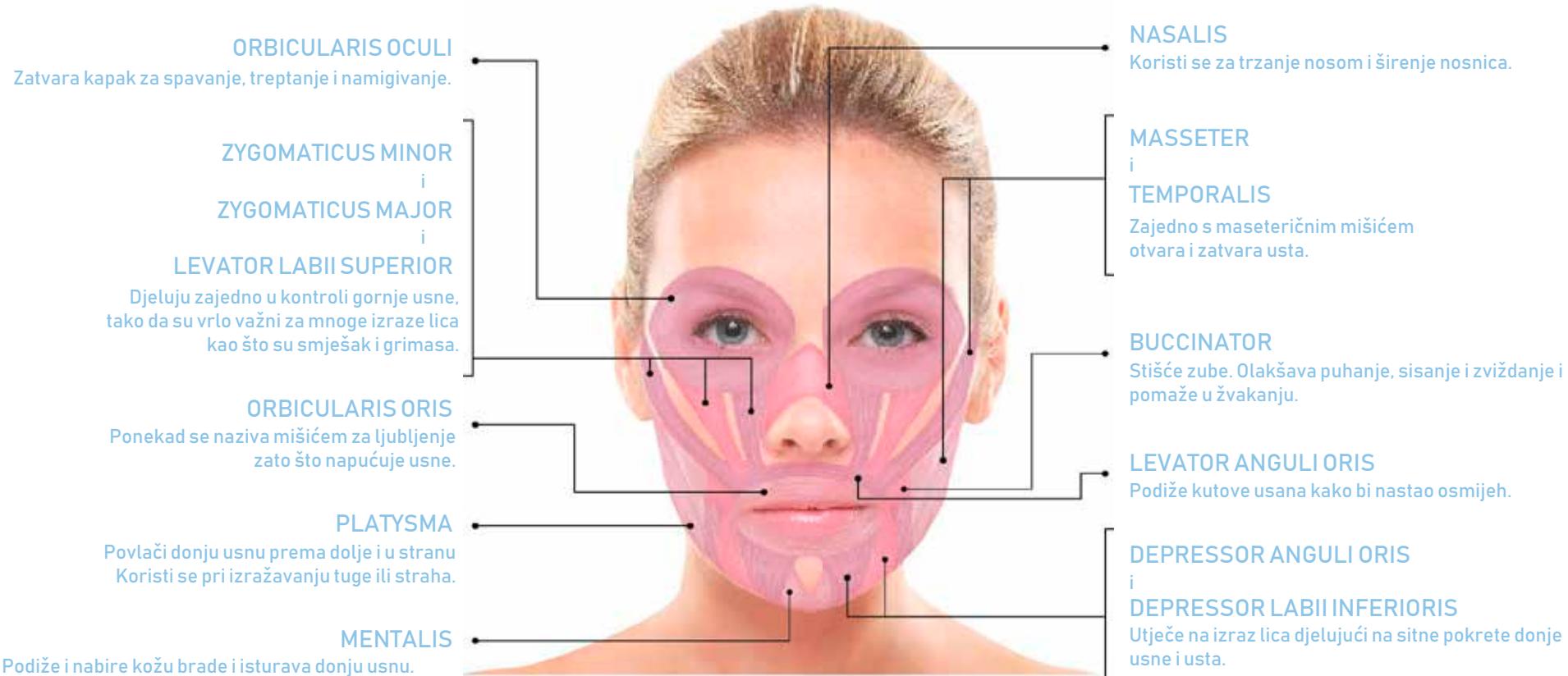


1. Učinci na sloj potkožnog masnog tkiva
**JEDNOSTRUKA, DVOSTRUKA, NAVOJNA,
DVOSTRUKA NAVOJNA**
2. Učinci na sloj potkožnog masnog tkiva
**JEDNOSTRUKA, JEDNOSTRUKA KANILA ZA OKO,
NAVOJNA, DVOSTRUKA NAVOJNA**
3. Učinci na sloj potkožnog masnog tkiva
**NAVOJNA, DVOSTRUKA NAVOJNA, DVOJNA,
LAGANA NAZUBLJENA NIT COG EASY 4-0**



JEDNOSTRUKA / DVOSTRUKA / DVOJNA / NAVOJNA / DVOSTRUKA NAVOJNA / ZLATNA

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom
nahođenju liječnika

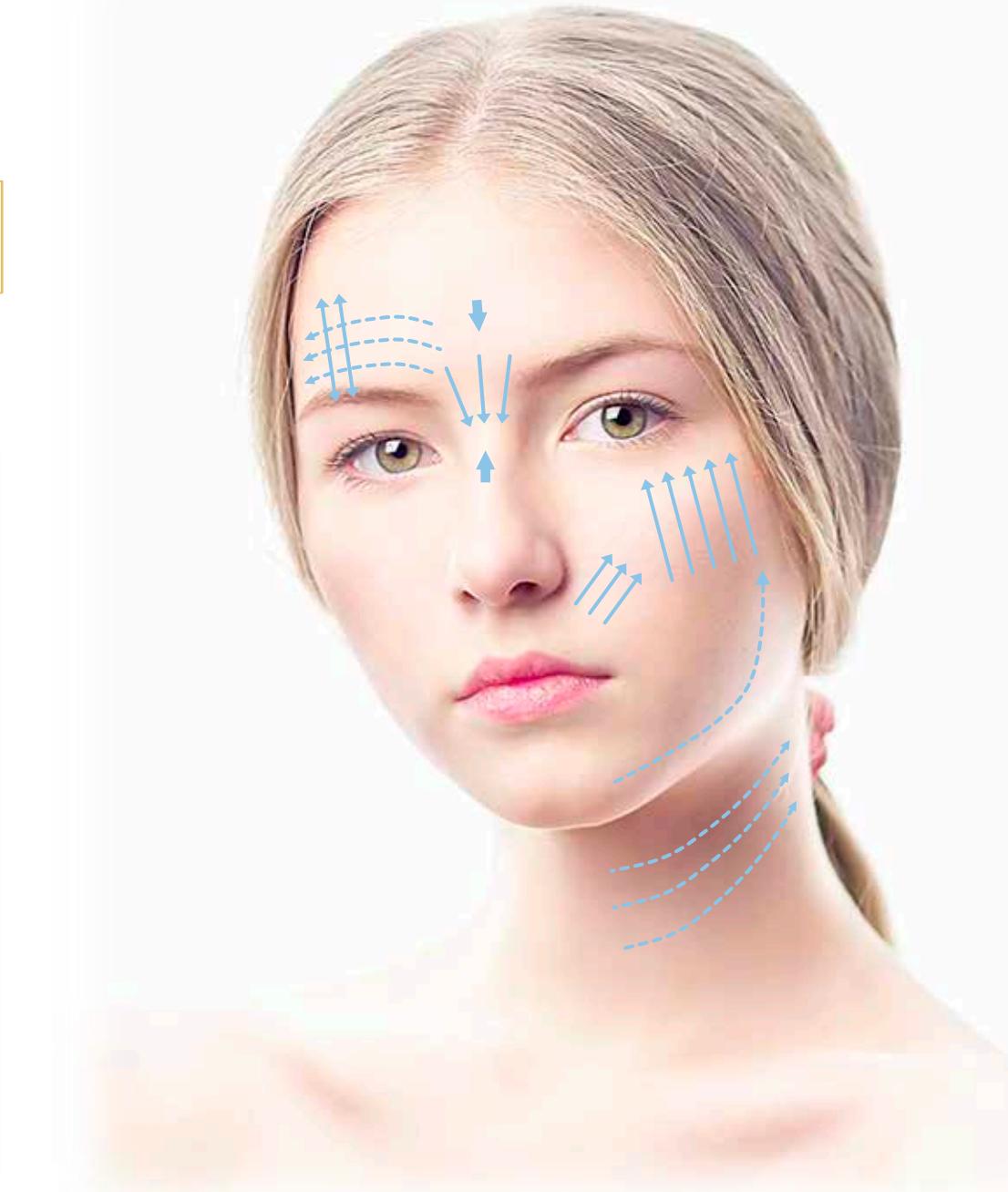

Učinci na sloj potkožnog masnog tkiva

Postiže se učinak usmjeravanja tkiva i zatezanja od područja polazišta do referentne točke.

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika



Učinci na sloj potkožnog masnog tkiva

Kad se konac umetne, stvara se podražaj koji uzrokuje zatezanje kože i učinke podizanja.

Smanjenje volumena koje nastane kod podizanja u području čeljusti potvrda je načela zatezanja kože pod utjecajem podražaja.

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika




JEDNOSTRUKA / DVOSTRUKA / DVOJNA

Nemojte podizati kožu. Lagano pritisnite prilikom umetanja. (Kako biste znali točnu dubinu) Budite oprezni u smislu dubine i smjera jer pacijenti mogu imati teške bolove ili krvarenje ako se niti postavljaju ispod jagodice.

Kada se postupak primjenjuje previše duboko, oštećuju se krvne žile i može doći do oticanja kao kod vađenja umnjaka.

Ako pacijent ima naglašenu bradu, preporučuje se nanošenje još nekoliko niti u bradu.

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

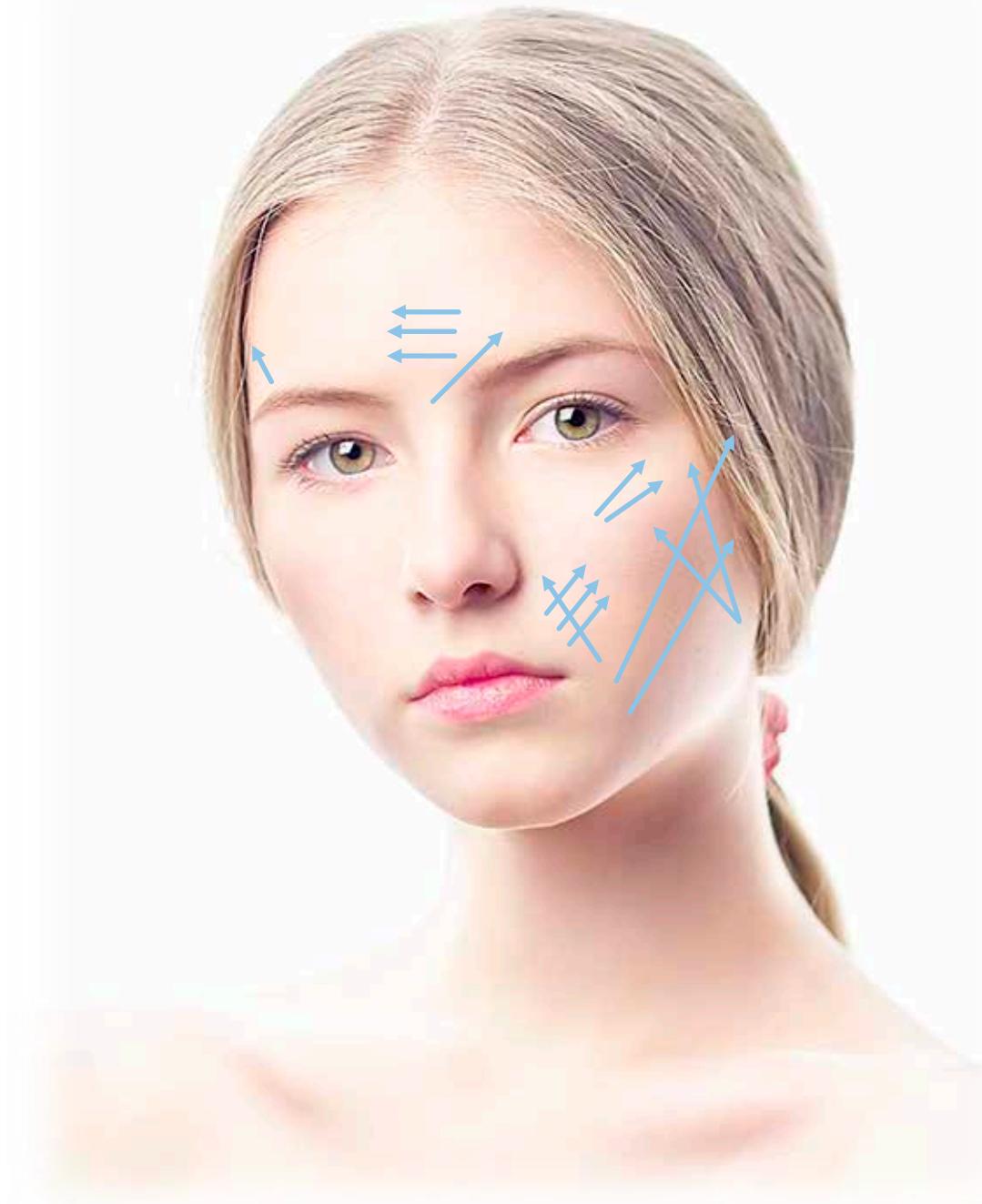


JEDNOSTRUKA / DVOSTRUKA / DVOJNA

Nemojte podizati kožu. Lagano pritisnite prilikom umetanja. (Kako biste znali točnu dubinu) Budite oprezni u smislu dubine i smjera jer pacijenti mogu imati teške bolove ili krvarenje ako se niti postavljaju ispod jagodice.

Kada se postupak primjenjuje previše duboko, oštećuju se krvne žile i može doći do oticanja kao kod vađenja umnjaka.

Ako pacijent ima naglašenu bradu, preporučuje se nanošenje još nekoliko niti u bradu.

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

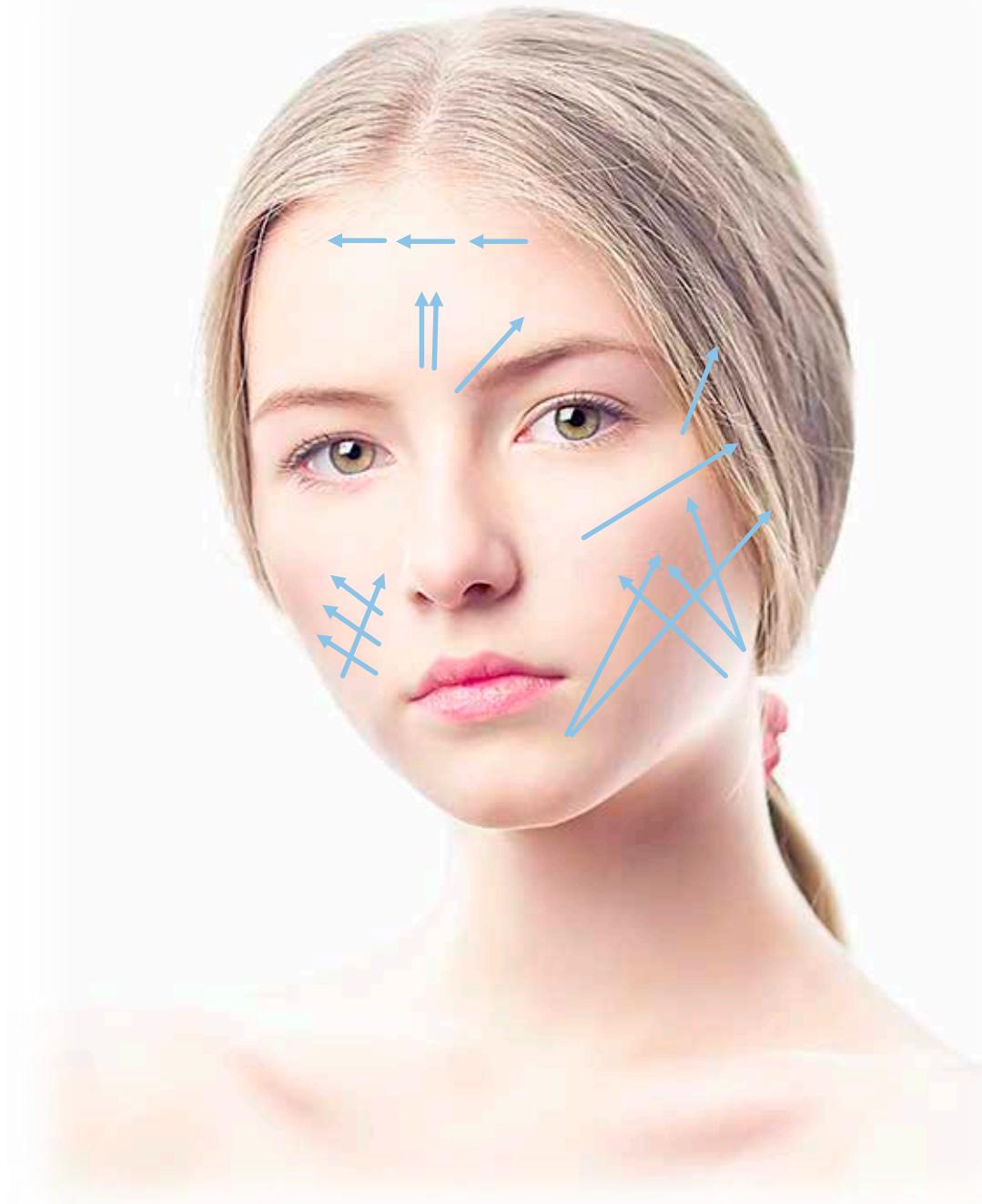

Sidrenje lagane nazubljene niti COG Easy 4-0


1. C2338 23G / 38mm / Oštra igla
2. C2360 23G / 60mm / Oštra igla
3. C2390 23G / 90mm / Oštra igla

Učinak: Stvaranje kolagena, popunjavanje, podizanje

Odaberite model s obzirom na veličinu i stanje lica pacijenta

Single-Direction

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

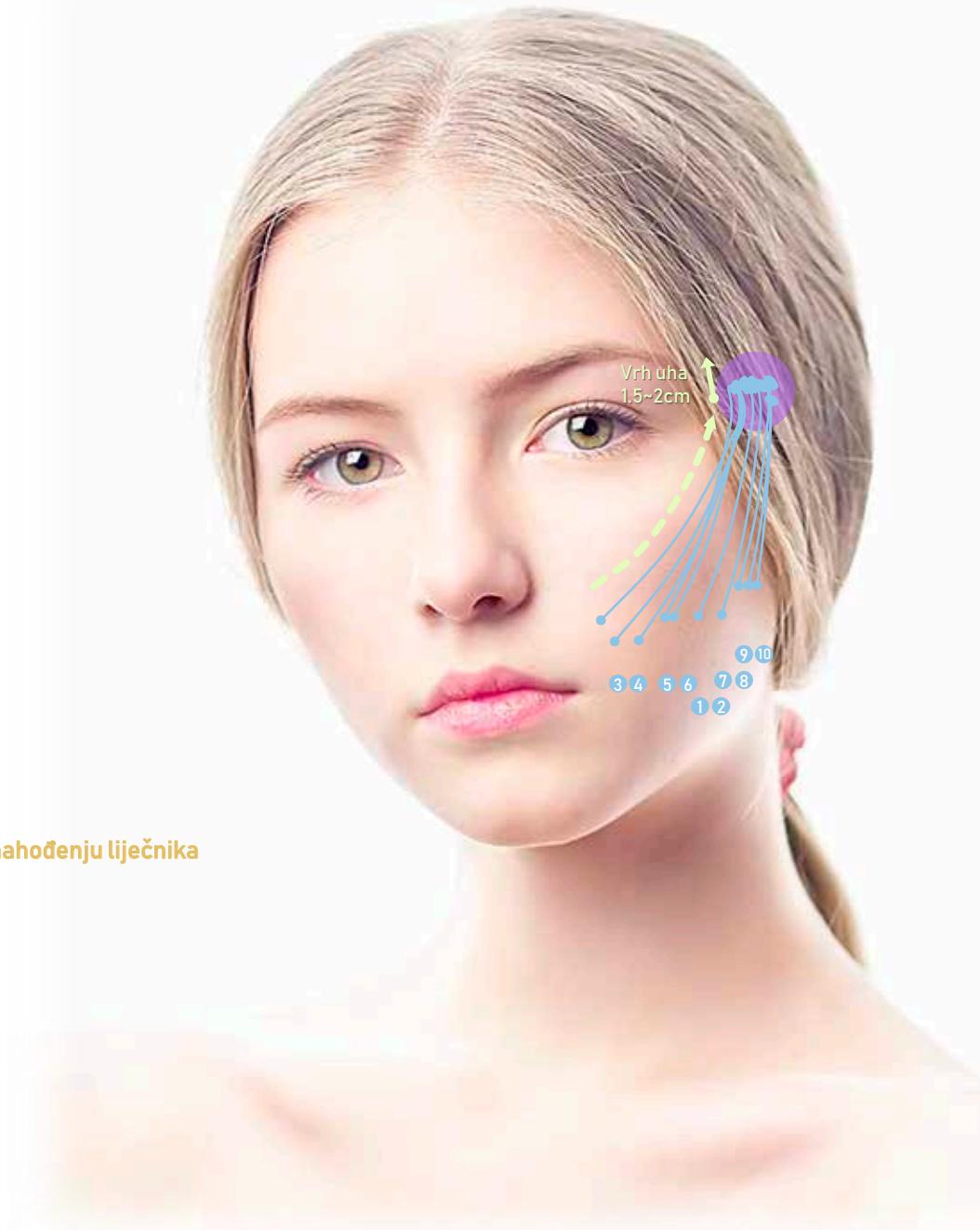

Sidrenje lagane nazubljene niti COG Easy 4-0

1. C2338 23G / 38mm / Oštra igla
2. C2360 23G / 60mm / Oštra igla
3. C2390 23G / 90mm / Oštra igla

Učinak: Stvaranje kolagena, popunjavanje, podizanje

Odaberite model s obzirom na veličinu i stanje lica pacijenta

Single-Direction

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika




Sidrenje osnovne nazubljene niti COG Basic

1. M19B1014 19G /100mm /tupa igla /dvosmjerno
 L19C1015 19G /100mm /L kanila /dvosmjerno
 M19T1019 19G /100mm /tupa igla /zub 6D 360 stupnjeva
 L19T1019 19G /100mm /L kanila /zub 6D 360 stupnjeva
 2. kombinacija 21G, 23G nazubljena nit
 3. Cog Easy 4-0
- Single-Direction

Učinak: Snažno podizanje, učvršćivanje, stvaranje kolagena
 smanjenje bora

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

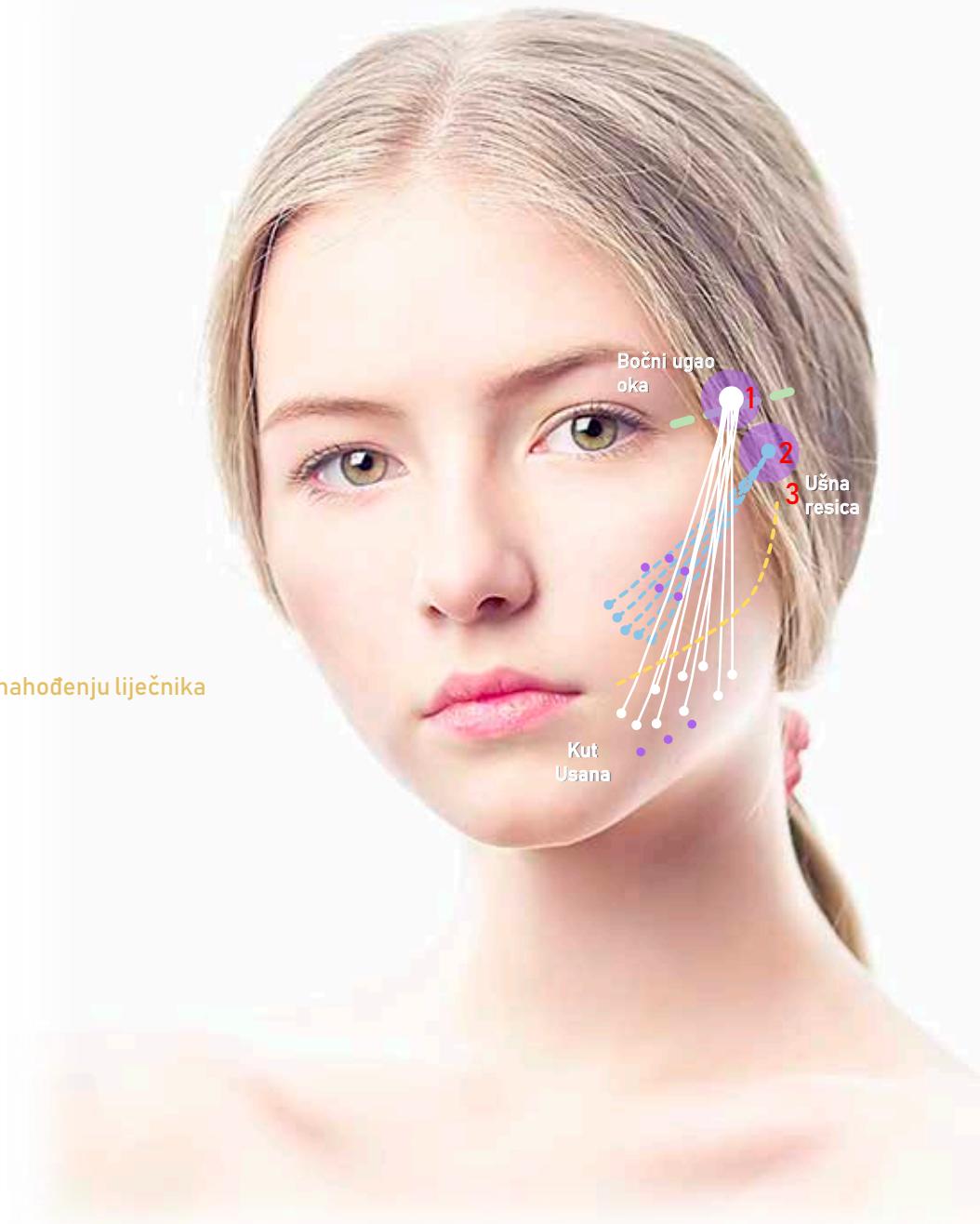


Oko (Jednostruka / Uvrnuta / Navojna)

M3025 : 30G 25mm
M2938 : 29G 38mm
M2938C : 29G 38mm
H2938 : 29G 38mm
TH2638 : 26G 38mm
TH2538 : 25G 38mm

Jači učinak

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

Učinak: Poboljšanje sitnih bora
oko očiju, Stvaranje kolagena, popunjavanje

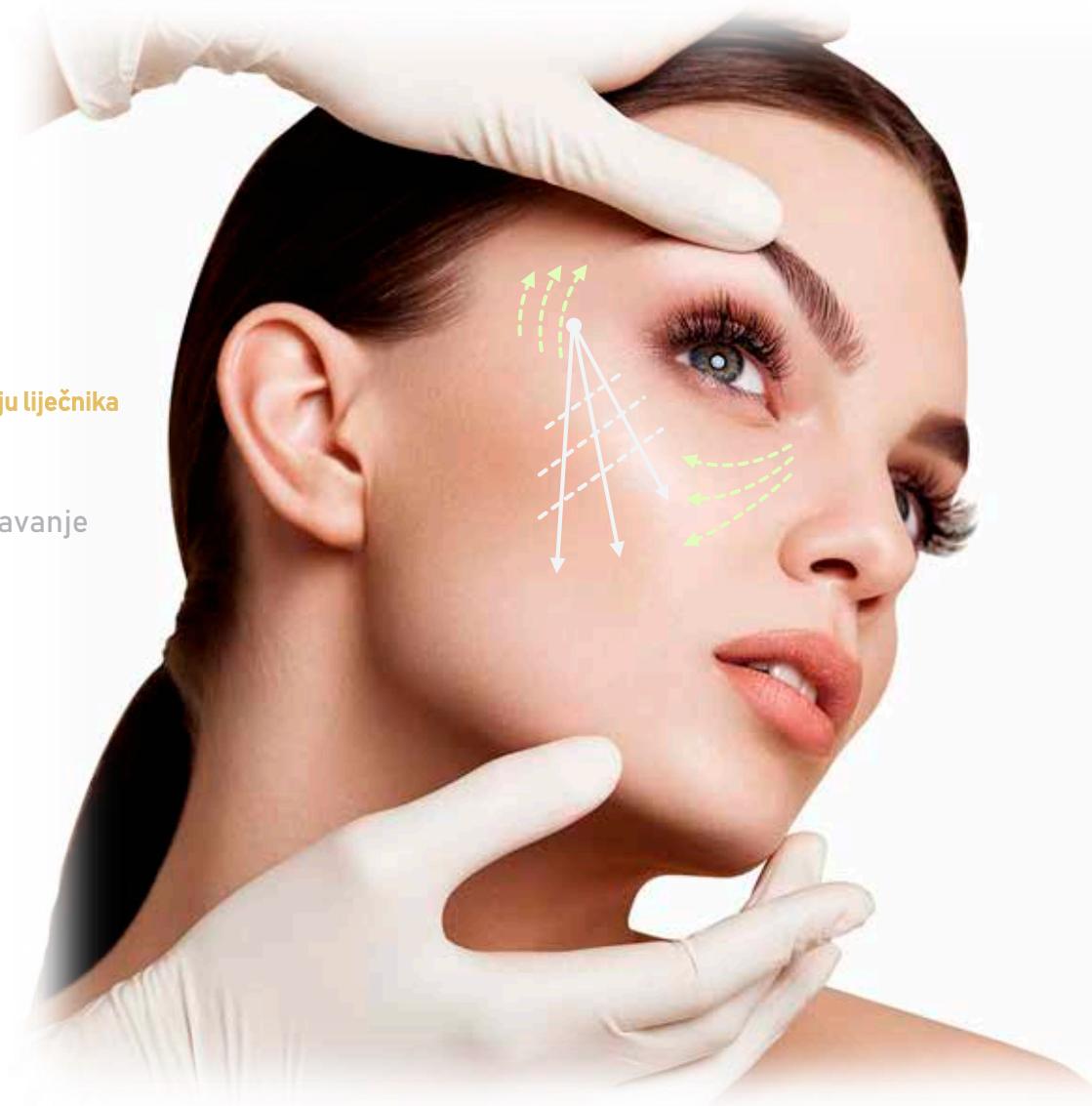

Oči (jednostruka kanila za oči)

MB3025 : 30G 25mm / Kanila tipa B



Učinak: Poboljšanje sitnih bora
oko očiju, manje krvarenja,
manje modrica **uporabom kanile tipa B**

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta
i vlastitom nahođenju liječnika





Nos (KANILA S NAZUBLJENOM NITI)

L19E0206 : 19G / 60mm / Kanila tipa L / dvosmjerna 
L19E0207 : 19G / 70mm / Kanila tipa L / dvosmjerna 

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika



Učinak: Preoblikovanje nosa

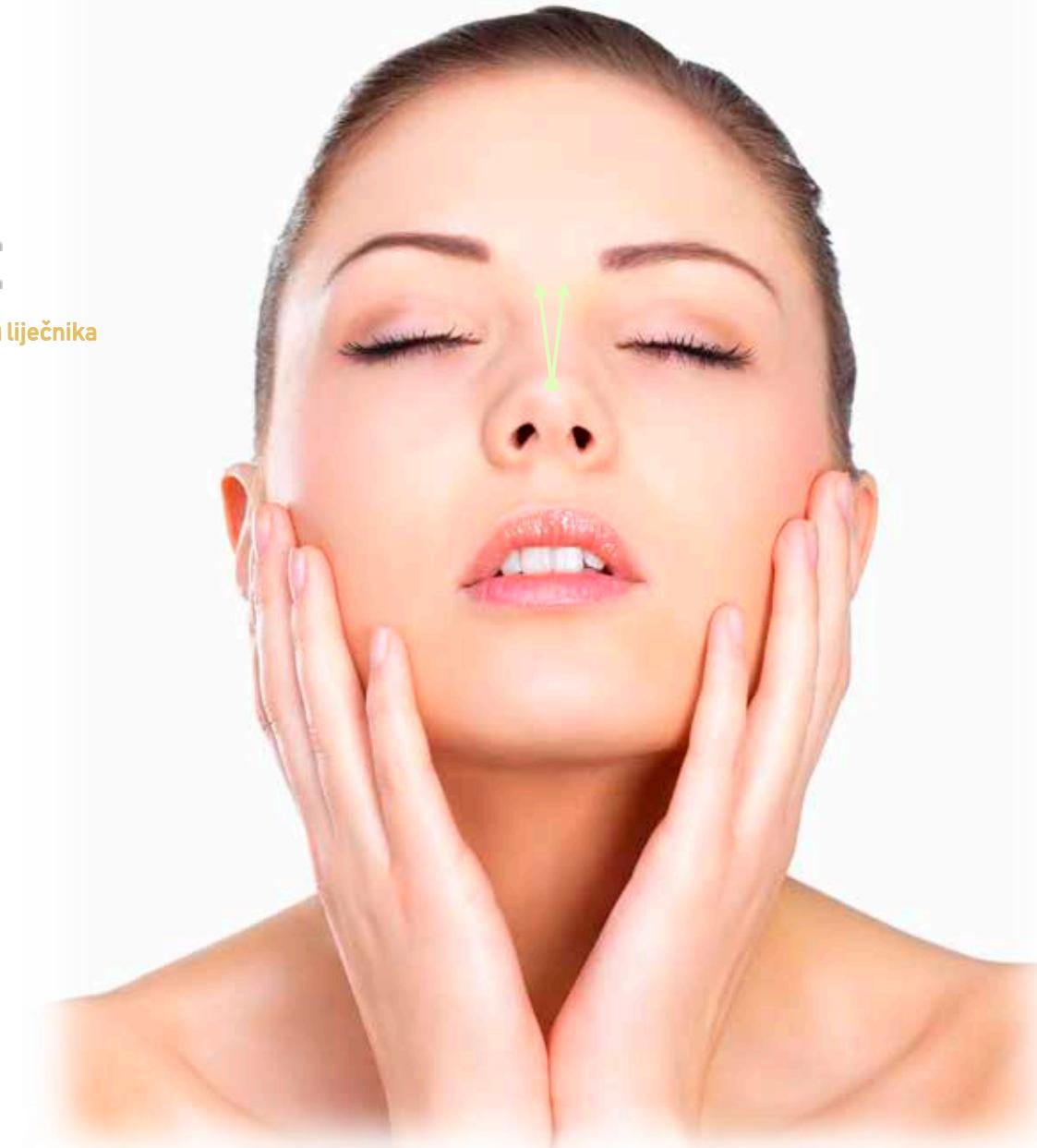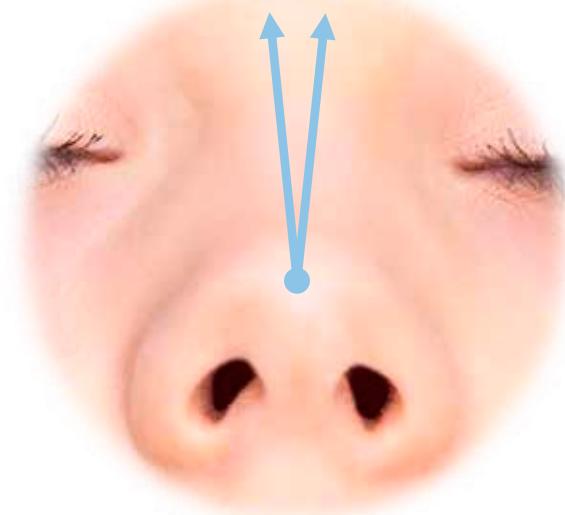



Nos (Jednostruka / Uvrnuta / Navojna)

M3025 : 30G 25mm
M2938 : 29G 38mm
M2938C : 29G 38mm
H2938 : 29G 38mm
TH2638 : 26G 38mm
TH2538 : 25G 38mm

Jači učinak

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

Učinak: Stvaranje kolagena, popunjavanje

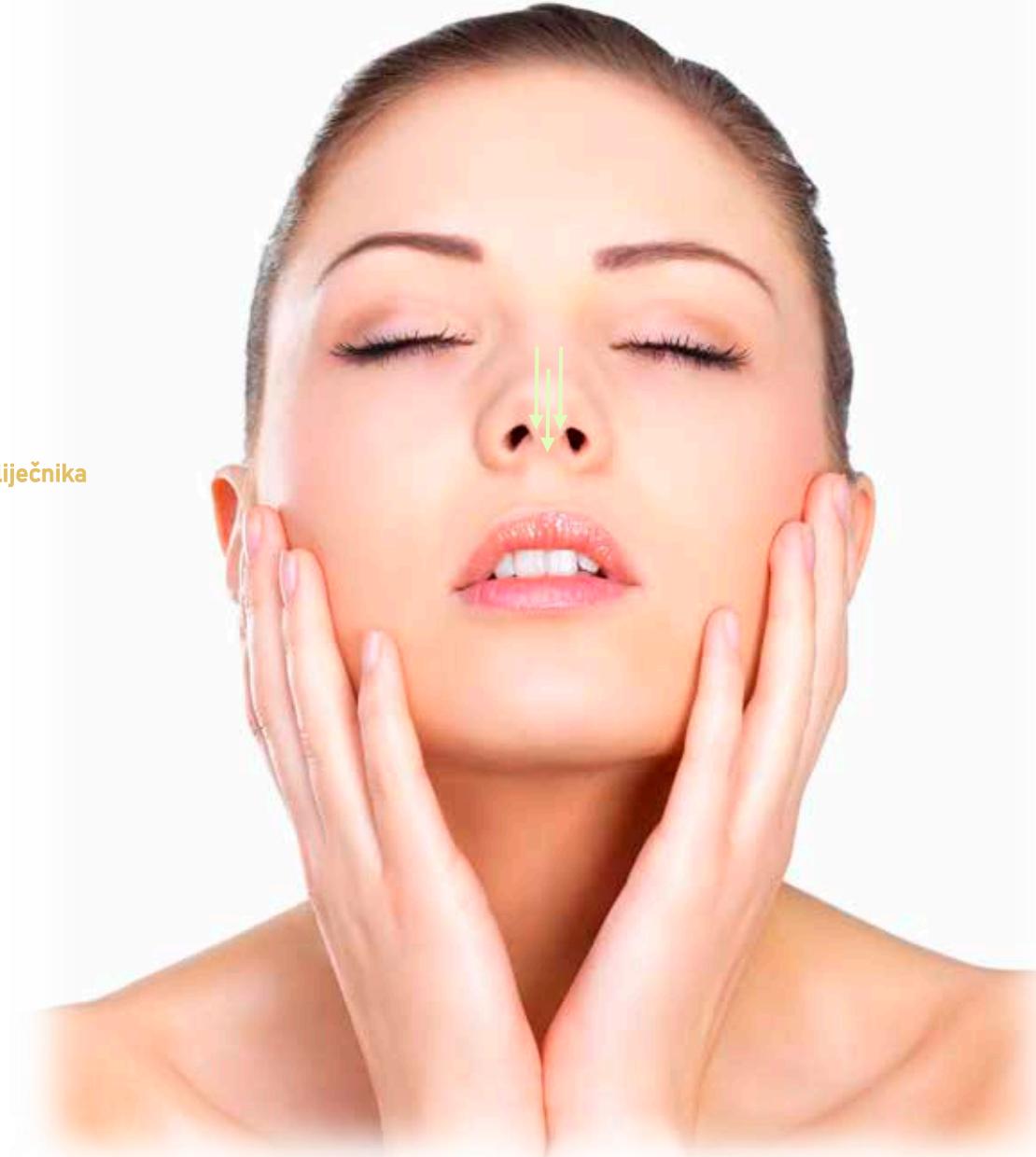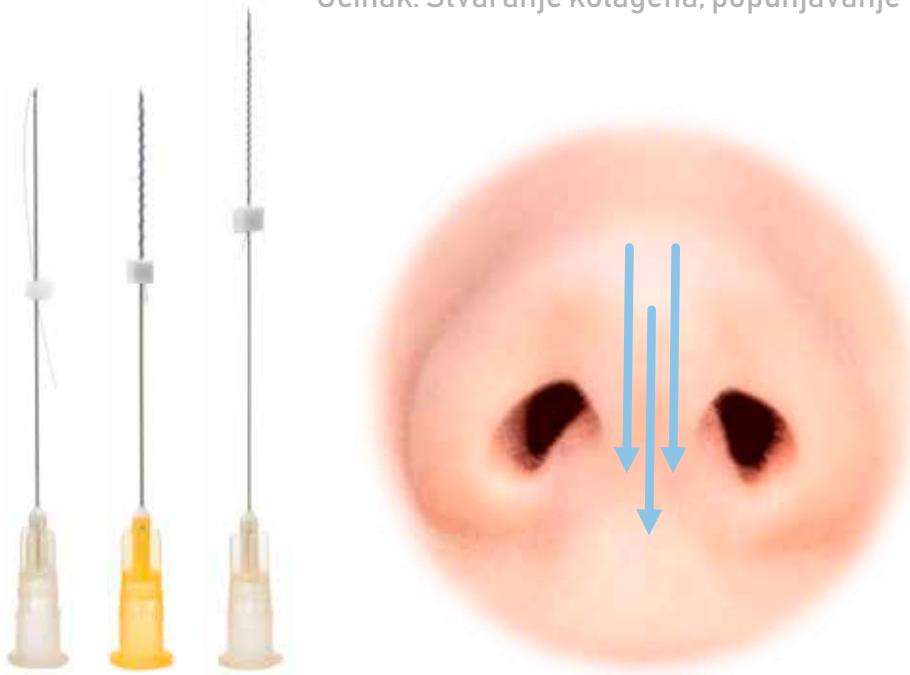


Nos (Jednostruka / Uvrnuta / Navojna)

M3025 : 30G 25mm
M2938 : 29G 38mm
M2938C : 29G 38mm
H2938 : 29G 38mm
TH2638 : 26G 38mm
TH2538 : 25G 38mm

Jači učinak

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

Učinak: Stvaranje kolagena, popunjavanje

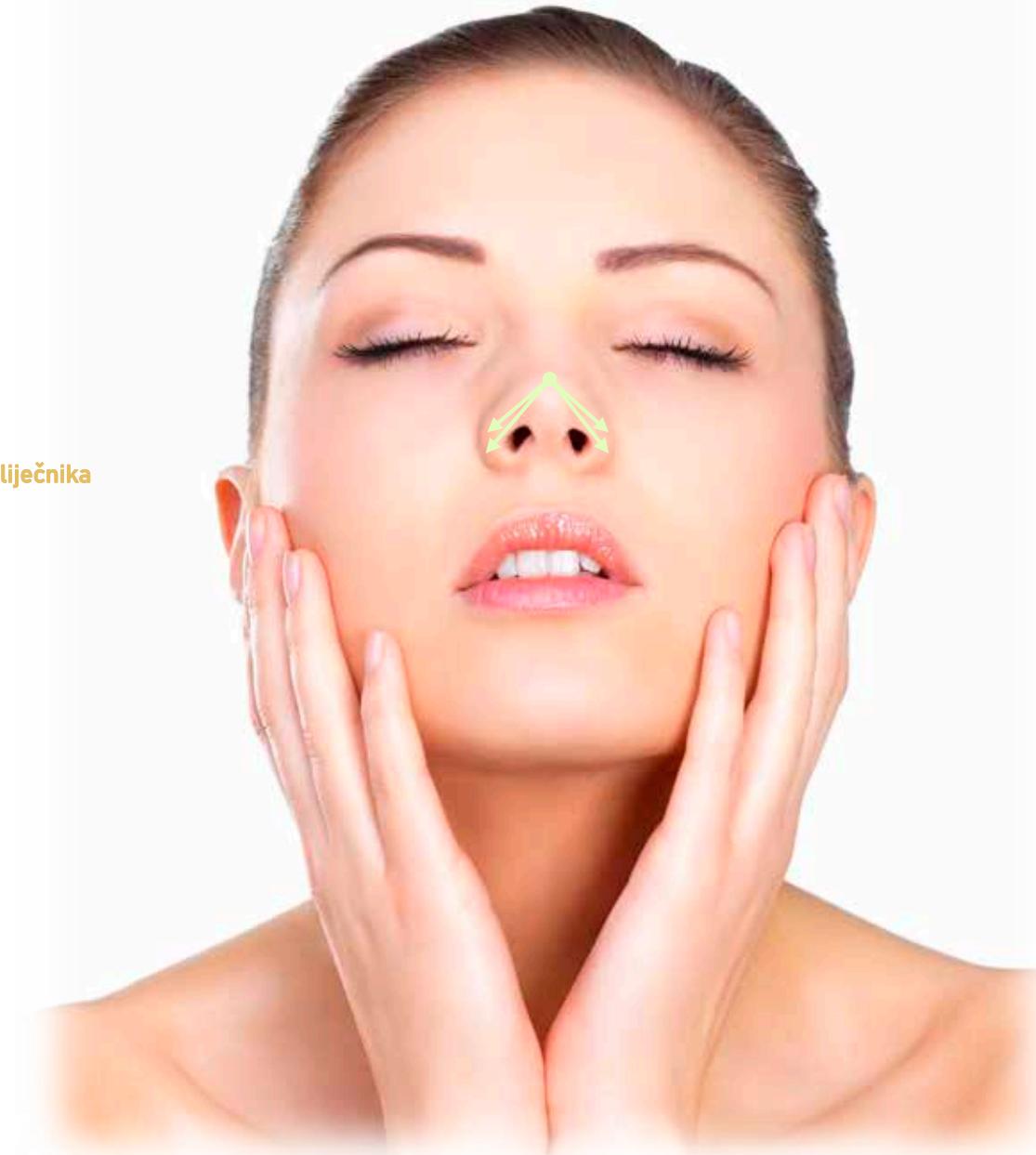

Trbuš (Jednostruka / Uvrnuta / Navojna)

M2650 : 26G 50mm
M2660 : 26G 60mm
M2690 : 26G 90mm
T2650 : 26G 50mm
T2550 : 25G 50mm
T2690 : 26G 90mm
H2660 : 26G 60mm
H2690 : 26G 90mm
TH2690 : 26G 90mm

Jači učinak



Učinak: Stvaranje kolagena, popunjavanje bora, elastična koža, smanjenje masnog tkiva



- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

Trbuš (Jednostruka / Uvrnuta / Navojna)

M2650 : 26G 50mm
M2660 : 26G 60mm
M2690 : 26G 90mm
T2650 : 26G 50mm
T2550 : 25G 50mm
T2690 : 26G 90mm
H2660 : 26G 60mm
H2690 : 26G 90mm
TH2690 : 26G 90mm

Jači učinak

Učinak: Stvaranje kolagena, popunjavanje bora, elastična koža, smanjenje masnog tkiva



- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika



Stražnjica (Jednostruka / Uvrnuta / Navojna)

M2650 : 26G 50mm
M2660 : 26G 60mm
M2690 : 26G 90mm
T2650 : 26G 50mm
T2550 : 25G 50mm
T2690 : 26G 90mm
H2660 : 26G 60mm
H2690 : 26G 90mm
TH2690 : 26G 90mm

Jači učinak



Učinak: Stvaranje kolagena, popunjavanje bora, elastična koža, podizanje kuka



- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

Stražnjica (Jednostruka / Uvrnuta / Navojna)

M2650 : 26G 50mm
M2660 : 26G 60mm
M2690 : 26G 90mm
T2650 : 26G 50mm
T2550 : 25G 50mm
T2690 : 26G 90mm
H2660 : 26G 60mm
H2690 : 26G 90mm
TH2690 : 26G 90mm

Jači učinak



Učinak: Stvaranje kolagena, popunjavanje bora, elastična koža, podizanje kuka



- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i vlastitom nahođenju liječnika

Jednostavna kombinacija



- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i prosudbi lječnika
- Odaberite model uzimajući u obzir veličinu pacijentova lica i njegovo stanje



Uobičajene kombinacije

JEDNOSTRUKA I JEDNOSTRUKA BIJELA
TIP | Oštra

	Jednostruka	Jednostruka bijela	
Kalibar	Duljina	Kalibar	Duljina
26G	38mm 50mm 60mm	26G	38mm 50mm 60mm
29G	90mm 38mm 50mm	29G	90mm 38mm 50mm
30G	25mm 38mm		

Prozirna

ZLATNA I DVOJNA
TIP | Oštra

Zlatna nit	Dvojna nit		
Kalibar	Duljina	Kalibar	Duljina
26G	38mm 50mm	26G	38mm 50mm
29G	38mm 50mm		

99.99% čisto zlato
PDO + PGA
propanediol +
poliglikolna kiselina)

JEDNOSTRUKA KANILA ZA OČI
TIP | Kanila tipa B


Kalibar	Duljina
30G	25mm

NAVOJNA
TIP | Oštra

Kalibar	Duljina
26G	60mm 90mm
29G	38mm 50mm


NAVOJNA I DVOJNA NAVOJNA
TIP | Oštra

Kalibar	Duljina
25G	38mm 50mm
26G	38mm 50mm 90mm

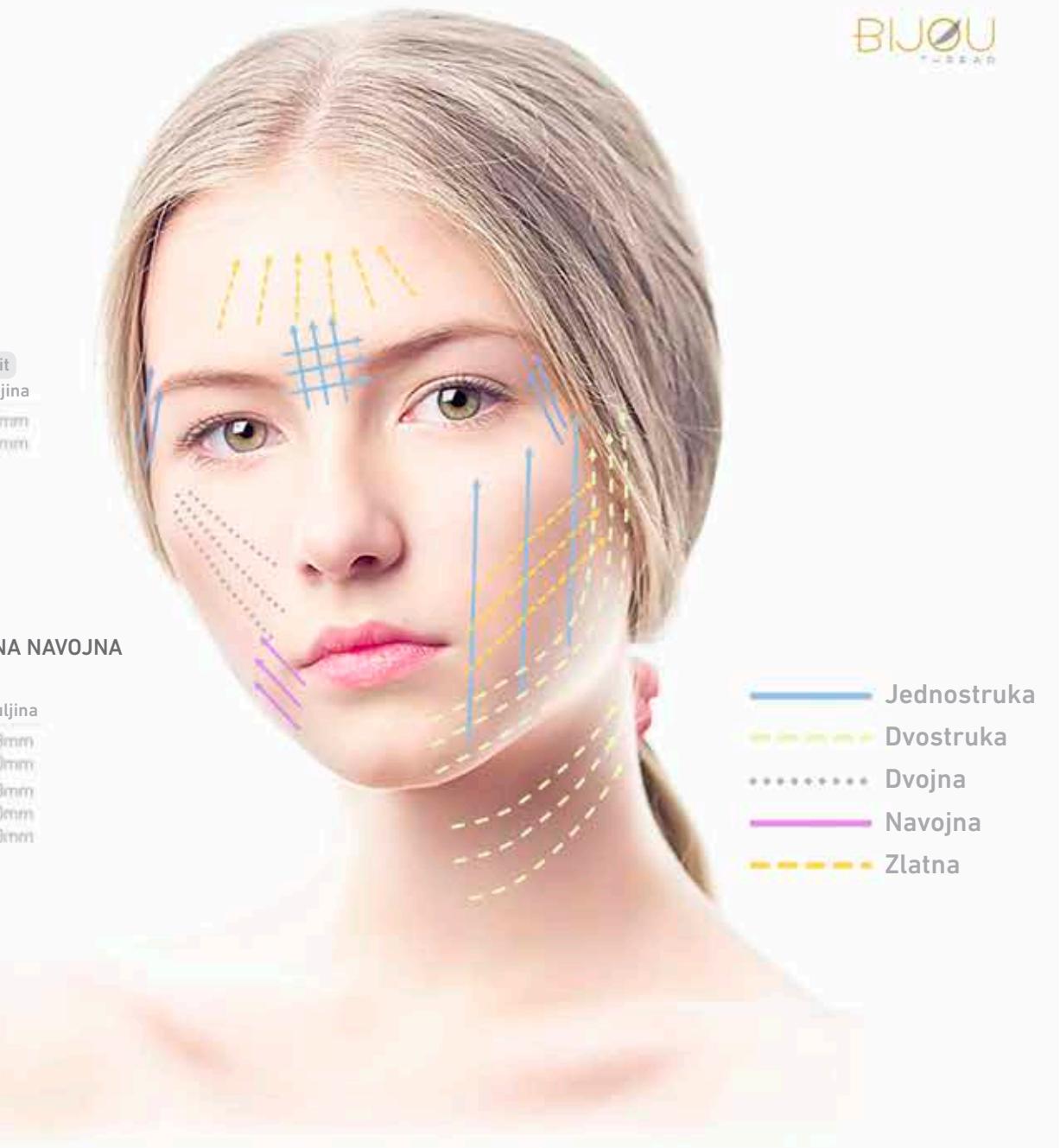

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i prosudbi liječnika
- Odaberite model uzimajući u obzir veličinu pacijentova lica i njegovo stanje

Potpuna kombinacija

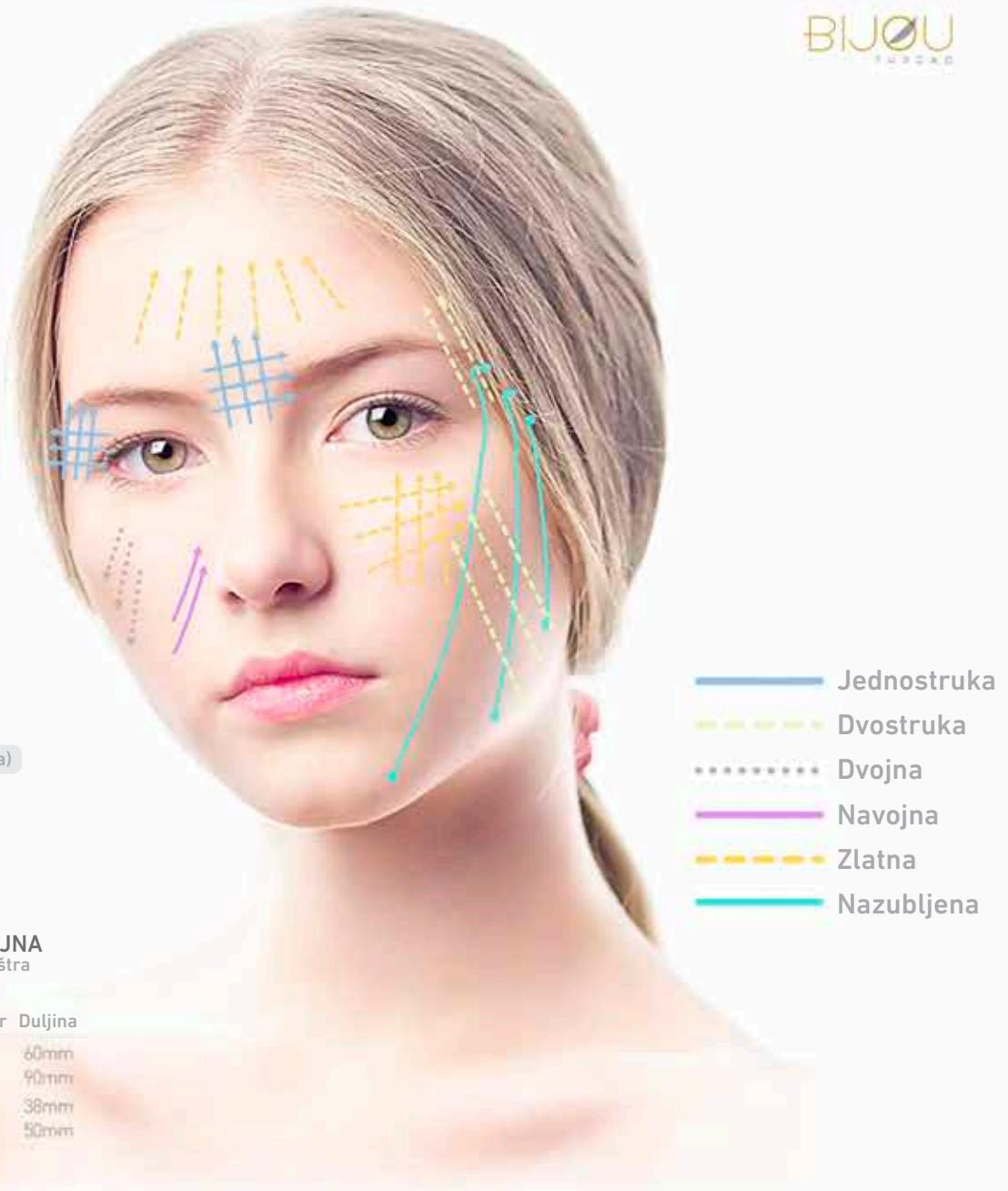

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i prosudbi liječnika
- Odaberite model uzimajući u obzir veličinu pacijentova lica i njegovo stanje

Kombinacija botoksa, filera i niti



JEDNOTRUKA I JEDNOSTRUKA BIJELA
TIP | Oštra

	Jednotruka	Jednostruka bijela	
Kalibar	Duljina	Kalibar	Duljina
26G	38mm 50mm 60mm	26G	38mm 50mm 60mm
29G	90mm 38mm 50mm	29G	90mm 38mm 50mm
30G	25mm 38mm		



DVOJNA I DVOJNA NAVOJNA
TIP | Oštra

Kalibar	Duljina
25G	38mm 50mm
26G	38mm 50mm 90mm



OSNOVNA
TIP | Tupa

2 tipa
(dvosmjerno i
višesmjeno)

Dvosmjerna	Višesmjerna		
Kalibar	Duljina	Kalibar	Duljina
19G	100mm	21G	90mm
21G	90mm	23G	60mm 90mm



ZLATNA I DVOJNA
TIP | Oštra

Zlatna nit	Dvojna nit		
Kalibar	Duljina	Kalibar	Duljina
26G	38mm 50mm	26G	38mm 50mm
29G	38mm 50mm		




KANILA
TIP | Kanila tipa L

Dvosmjerna	Višesmjerna	Dvosmjerno (dizanje nosa)	
Kalibar	Duljina	Kalibar	Duljina
19G	100mm	21G	90mm
21G	90mm	19G	60mm 70mm



NAZUBLJENA 360°
TIP | Tupa / Kanila tipa L

Kalibar	Duljina
19G	100mm
21G	90mm
23G	60mm 90mm

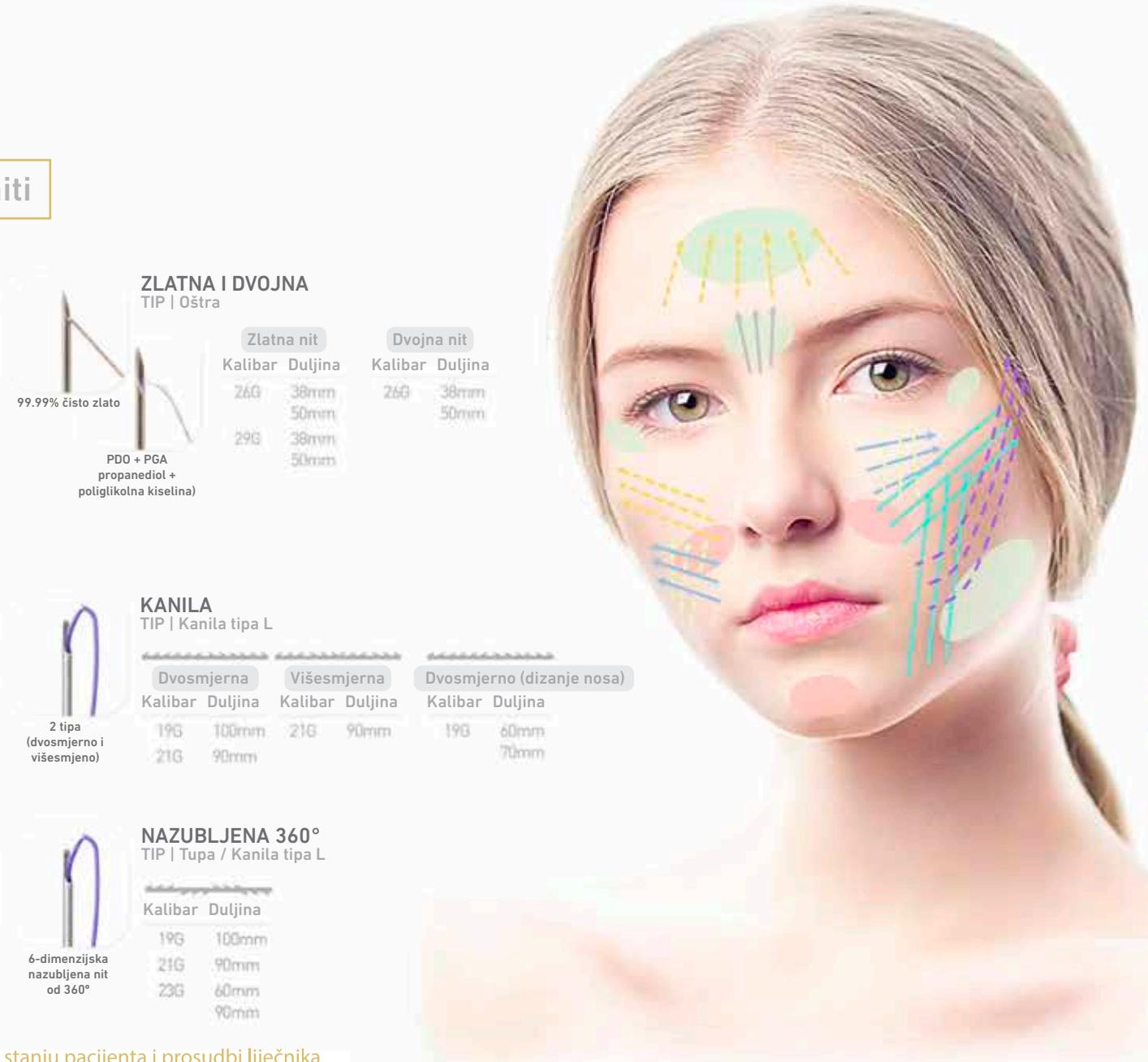

- Jednostruka
- Dvostruka
- Dvojna
- Zlatna
- Nazubljena
- Botoks
- Filer

- Preporučena nit može se razlikovati ovisno o stanju pacijenta i prosudbi lječnika
- Odaberite model uzimajući u obzir veličinu pacijentova lica i njegovo stanje







dnatech.eu



info@dnatech.eu

091 617 8410

Razgled 18,
10000 Zagreb

